


#### 4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

To myAIRVO 2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ποικιλία συνδετικών ασθενή. Διαβάστε τις ξεχωριστές οδηγίες χρήστη για τα συνδετικά ασθενή που χρησιμοποιούνται, καθώς και όλες τις προειδοποιήσεις.

##### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μην τροποποιείτε τον αναπνευστικό σωλήνα ή το συνδετικό με κανένα τρόπο.
- Μην χρησιμοποιείτε συνδετικά ασθενή που δεν αναφέρονται εδώ.

##### Ρινικός καθετήρας (OPT842/OPT844/OPT846)

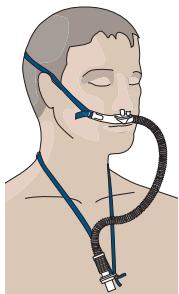

Αν χρησιμοποιείτε το ρινικό συνδετικό, τοποθετήστε το λουράκι γύρω από τον αυχένα. Κρατήστε το ρινικό συνδετικό στη μύτη και εν συνεχείᾳ τοποθετήστε τον ελαστικό βρόχο πίσω από το κεφάλι και πάνω από τα αυτιά.


Ο ελαστικός βρόχος μπορεί να ρυθμιστεί τραβώντας τον στα πλάγια. Ρυθμίστε το μεγαλύτερο βρόχο γύρω από τον αυχένα αν χρειάζεται, έτσι ώστε να μπορεί να κινηθεί το κεφάλι χωρίς να τραβιέται ο βρόχος.

##### Ρινικός καθετήρας (OPT316/OPT318)




Ανατρέξτε στις ξεχωριστές οδηγίες χρήστη.

##### Συνδετικό τραχειοστομίαση (OPT870)

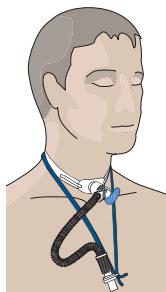

Αν χρησιμοποιείτε το συνδετικό τραχειοστομίαση, τοποθετήστε το λουράκι γύρω από τον αυχένα, προσαρτήστε το σύνδεσμο σωλήνα τραχειοστομίασης όπως φαίνεται, και ρυθμίστε το μήκος του ιμάντα για μέγιστη άνεση.

##### Προσαρμογέας μάσκας (RT013)

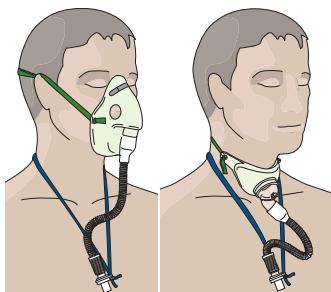

Αν χρησιμοποιείτε τυπική, αεριζόμενη μάσκα τραχειοστομίασης ή μάσκα προσώπου, συνδέστε το σύνδεσμο των 22 mm της μάσκας στον Προσαρμογέα μάσκας RT013. Τοποθετήστε το λουράκι γύρω από τον αυχένα και προσαρμόστε τη μάσκα με το συνήθη τρόπο.

##### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Σημειώστε ότι ο προσαρμογέας μάσκας RT013 έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο με αεριζόμενες μάσκες. Μην χρησιμοποιείτε στεγανοποιημένες μάσκες.